



衝撃吸収マット 衝撃吸収センサーマット

取扱説明書

目次

安全上のご注意	P. 2
ご使用方法	P. 2
ナースコールへの接続方法	P. 3
主な仕様一覧	P. 3
保証規定	P. 4

ご使用いただく前に

この度は、衝撃吸収マット、または衝撃吸収センサーマットをお買上げいただき、誠にありがとうございます。

本製品は、ご利用者が転倒転落時衝撃を吸収するマットです。またセンサーマットは、ご利用者がマットに落ちた時、内蔵センサーが検知してお知らせします。

正しくお使いいただくために、取扱説明書をよくお読みください。なお、この取扱説明書は大切に保管してください。

この製品は、あくまでも介護者さんがご利用者の安全を見守るうえでの手助けをするものです。安全を保証するものではありません。

ご使用前に必ずお読みください

- 安全性などに関して保証を行なうものではなく、万一なんらかの損害が発生したとしても一切の責任を免責させていただきますのでご了承ください。

安全上のご注意

本製品を正しく安全に、また良好な状態でお使いいただくために、この安全上のご注意をよく読んで正しくお使いください。



万一、異常が発生した時はすぐに使用を止めてください。

- マットが破損したとき
- 衝撃吸収材が破損した場合





分解禁止

分解しない

本製品を分解、改造しないでください。怪我の原因となります。

ご使用方法

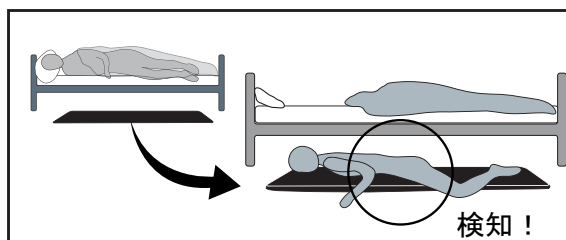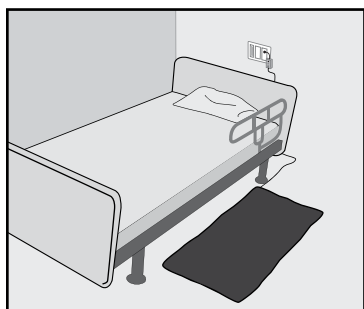


1. 衝撃吸収マット・衝撃吸収センサーマットをベッドサイドに設置します。
センサー付きマットをご使用の場合は、コードが人の足やベッドの動く部分にかからないようご注意ください。
2. 衝撃吸収センサーマットをナースコールに接続する場合
右ページ「ナースコール接続方法」をご参照ください。
3. 無線でナースコールに接続する場合
「見張り番Ⅱ NC受信機」取扱説明書をご参照ください。
4. マイメロディーSをご使用の場合
「マイメロディーS」取扱説明書をご参照ください。

ナースコールへの接続方法

ナースコールシステムはメーカーによって仕様が違います。エクセルエンジニアリングの各種センサーは専用分岐ボックスにて簡単に各社ナースコールに接続が可能です。

分岐ボックスと衝撃吸収センサーマットを下図のように設置して接続してください。

1. 衝撃吸収センサーマット接続コードを分岐ボックスのセンサー接続に差し込みます。
2. ナースコール子機/握りボタンは分岐ボックスのナースコール接続に差し込みます。
3. 分岐ボックスをナースコールの壁面パネルに接続します。

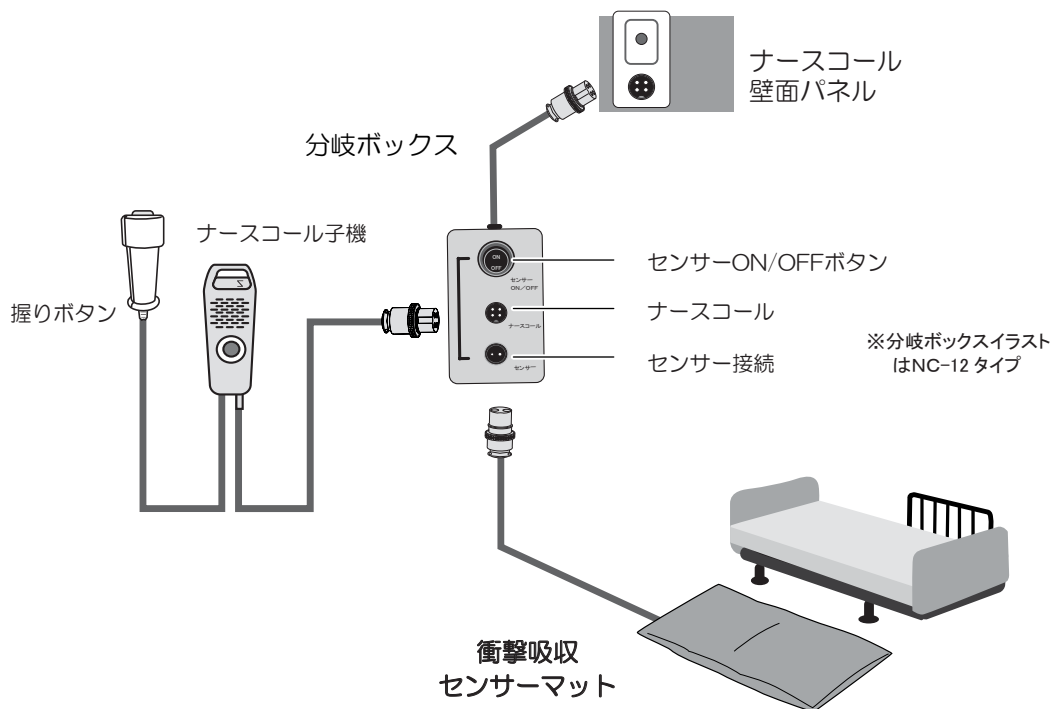

イラストは標準タイプの接続例です。
他のタイプのナースコール仕様接続についてはお問い合わせください。

主な仕様一覧

衝撃吸収マット/衝撃吸収センサーマット	
サイズ	1800mm x 750mm x 40mm
重量	衝撃吸収マット：2430g 衝撃吸収センサーマット：2700g
内部クッション材	EPE（発泡ポリエチレン）
表面素材	PVC（ポリ塩化ビニル）・抗菌・防滴
センサー感知荷重	約15Kg/15cm ²

保証書 (保証規定)

1. 「衝撃吸収マット」「衝撃吸収センサーマット」はお買い上げの日から1年間保証いたします。
2. お客さまが取扱説明書に従った使用状態のもとで、保証期限内に万一故障した場合には、無償で修理または交換をさせていただきます。
3. 保証期限内でも次のような場合は有料修理とさせていただきます。
 - ① 本保証書のご提示のない場合
 - ② 本保証書にお客さま名、お買い上げ年月日、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書きかえられた場合
 - ③ 使用上の誤りまたは不当な修理や改造による故障および損傷
 - ④ 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変による故障及び損傷
 - ⑤ お買い上げ後の取付場所の移動、落下等による故障および損傷
4. この保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

* 故障品の修理を円滑にかつ迅速に行うため、修理をご希望の際は、お買い上げ店またはお客さま相談室まで保証書を添付のうえ、ご郵送ください。

品番	EFM-60		問 合 せ 先	お客様相談室 株式会社エクセルエンジニアリング 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町4-2-10 坂田ビル5F TEL: 03-3516-1560 FAX: 03-3231-1530 http://www.excel-jpn.com e-mail excel@excel-jpn.com
	EFM-60N			
製造番号				
保証期間	*お買い上げ日から1年間 お買い上げ日 年 月 日			
お客様	ご住所	〒		
	お名前	(フリガナ)		
	TEL	市外局番 ()		

販売店	製造発売元 株式会社エクセルエンジニアリング 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町4-2-10 坂田ビル5F TEL: 03-3516-1560 FAX: 03-3231-1530 http://www.excel-jpn.com e-mail excel@excel-jpn.com
-----	---