

【無線分岐ボックス】

送信機の登録方法



1. 一時停止ボタンを押しながら○
2. ACアダプターをさします。↑
3. 電源ランプが緑色に点滅したら、✱
4. 一時停止ボタンから手を離します。
5. センサーを反応させます
(例)フロアセンサーを押す、
ベッドセンサーを押す、
赤外線センサーの前に手をかざす
6. 1番目のランプが点灯します。✱
7. ACアダプターを抜くと登録完了です。↓

送信機の削除方法



1. 一時停止ボタンを押しながら
2. ACアダプターをさします。
3. そのまま7秒間押し続けるとすべてのランプが点灯して消えます。
4. ACアダプターを抜いて完了です。