

「見張り番II」施設向けナースコールシステム NC-5000 送信機 取扱説明書

安全上のご注意

■本製品を正しく安全に、また良好な状態でお使いいただくために、この安全上のご注意をよく読んで正しくお使いください。

※品質、性能向上、その他の事情で部品を変更することがあります。

その際には、本書の内容と一部異なる場合もありますのであらかじめご了承ください。

■絵表示について

製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

※「注意」の欄に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。

いずれも安全に関する重要な内容を記載しています。必ずお守りください。

■絵表示の例

の記号は「注意（警告を含む）をうながす事項」を示します。

の記号は「してはいけない行為（禁止事項）」を示します。

の記号は「しなければならない行為」を示します。

! 警 告

万一、異常や故障が発生したときはすぐに使用をやめてください。

次のようなときは、そのまま使用すると、火災、感電の原因となります。

お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

- 煙が出ている、変なにおいや音がする（異常状態）
※煙が出なくなるのを確認し、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。

- 本機の内部に水や異物などが入った
- 落としたり、破損した



分解しない

本機を分解、改造しないでください。火災、感電の原因となります。内部の点検、調節、修理はお買い上げの販売店にご依頼ください。



ぬらさない

本機をぬらさないようにご注意ください。
火災、感電の原因となります。



本機の上に 水などの入った容器を置かない

禁 止 内部に水などが入った場合、火災、感電の原因となります。



注意



電気毛布・電気あんかなどの電気製品と同時使用しない

本機の故障や感電の原因となることがあります。



不安定な場所に置かない

不安定または振動の多い場所、棚などに置かないでください。落ちたり、倒れたりして、けがの原因となることがあります。

禁 止



設置場所に注意

●湿気、ほこりの多い場所や、油煙、湯気が当たる場所に置かないでください。火災、感電の原因となることがあります。

●直射日光が当たる場所など温度が高くなる場所に放置しないでください。火災、故障の原因となることがあります。



本機の上に重いものを置かない

禁 止

電波について

■本機は、2.4158GHzの周波数を使用する無線設備です。

移動体識別装置の帯域が回避不可能で、想定される与干渉距離は40mです。本機には、それを示す右記のマークが貼付されています。



■本機の使用周波数に関するご注意

この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）及び特定小電力無線局（免許を要しない無線局）並びにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。

1. この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局並びにアマチュア無線局が運用されていないことを確認して下さい。
2. 万一、本機から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、お客様相談室（ 保証書面に記載）にご連絡いただき混信回避のための処置等（例えば、パーティションの処置等）についてご相談ください。
3. その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合等何かお困りのことが起きたときは、お客様相談室へお問い合わせください。

電波干渉について

ワイヤレスナースコールシステムは、2.4GHzの周波数帯の電波を利用しています。この周波数帯では電子レンジや無線LAN機器等が電波を使用していますので、電波干渉により、通信に支障を及ぼす恐れがあります。また、他の危機の動作や性能に影響を及ぼすことがあります。

その他

■分解・改造することは法律で禁じられています。（故障の際はお買上げの販売店に修理をご依頼ください。）

各部の名称とはたらき

正面



アラームランプ


センサーが動作した時に2秒間点灯します。

ミニプラグジャック


センサーを接続します。

背面

カバー有

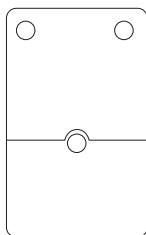

カバー無

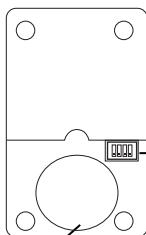

設定切替スイッチ

センサーが検知してから発報するまでの時間、
離床/徘徊のモード切替ができます。

電池ホルダー

ボタン電池（CR2032）を入れることで動作します。

登録した受信機に電池交換通知が出ましたら、
電池を交換してください。

※製品に付属している電池は、動作テスト用の為通常の電池寿命より短い場合があります。

動作設定

スイッチ位置					
動作モード	離床				徘徊
発報時間	0秒	1秒	2秒	4秒	—

保証書(保証規定)

1. 見張り番II送信機はお買い上げの日から1年間保障いたします。
2. お客様が取扱説明書にしたがった使用状態のもとで、保障期間内に万一故障をした場合には、無償で修理または交換をさせていただきます。
3. 保証期限内でも次のような場合は有料修理とさせていただきます。
 - ① 本保証書のご提示の無い場合
 - ② 本保証書にお客様名、お買い上げ年月日、販売店名の記入が無い場合、あるいは字句を書きかえられた場合
 - ③ 使用上の誤りまたは不当な修理や改造による故障および損傷
 - ④ 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障および損傷
 - ⑤ お買い上げ後の取付場所の移動、落下等による故障および損傷
 - ⑥ 本製品に接続している当社指定以外の機器および消耗品に起因する故障および損傷
4. この保証書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

* 故障品の修理を円滑にかつ迅速に行なうため、修理をご希望の際は、お買い上げ店またはお客様相談室まで本保証書を添付のうえ、ご郵送ください。

受信機か送信機のどちらの故障かわからない場合は、両方ともご郵送ください。

品番	NC-5000TXBF		問合せ先	お客様相談室 (株)エクセルエンジニアリング 〒101-0052 東京都千代田区神田小川町2-12-14 晴花ビル 9階 TEL: 03-5280-7120 FAX: 03-5280-7123 http://www.excel-jpn.com
製造番号				
保証期間	*お買い上げ日から1年間 お買い上げ日 年 月 日			
お客様	ご住所	〒		
	お名前	(フリガナ)		
	TEL	市外局番	()	

販売店	製造発売元 (株)エクセルエンジニアリング 〒101-0052 東京都千代田区神田小川町2-12-14 晴花ビル 9階 TEL: 03-5280-7120 FAX: 03-5280-7123 http://www.excel-jpn.com
-----	---