



『見張り番Ⅱ』 施設向け ワイヤレスナースコールシステム マグネットセンサー

取扱説明書 保証書

目次

安全上のご注意	2
各部の名称とはたらき	5
登録方法	6
使用方法	6
こんな時には・・・（故障とお考えになる前に）	7
製品仕様	7
保証規定	8

セット内容：

マグネットセンサー本体（ベッドハンガー、カバー付）：1台

クリップ、紐付きマグネット：1個

単3形アルカリ乾電池：2個 保証書付き取扱説明書（本書）：1冊

ご使用前に必ずお読みください

この度は、『見張り番Ⅱ』マグネットセンサーをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品は利用者さんが車イスから立ち上がろうとする時、またはベッドから降りようとした時にお知らせするセンサーです。

正しくお使いいただくために、取扱説明書をよくお読みください。なお、この取扱説明書は大切に保管してください。

本製品は、あくまでも介護者さんご自身が利用者さんの安全を見守るうえでの手助けをするものです。安全を保証するものではありません。

万一何らかの損害が発生したとしても一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

安全上のご注意

■本製品を正しく安全に、また良好な状態でお使いいただくために、この安全上のご注意をよく読んで正しくお使いください。

※仕様、デザイン、部品等は製品の改良等の理由により、予告なしに変更することがあります。その際には、本書の内容と一部異なる場合もありますのであらかじめご了承ください。

■ここに示した注意事項は、お使いになる方や他の方への危害や財産への損害を未然に防ぐための内容を記載しています。必ずお守りください。

■次の表示区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。



警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

※「注意」の欄に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載しています。必ずお守りください。

■次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。



禁止

禁止（してはいけないこと）を示します。



分解禁止

分解してはいけないことを示す記号です。



水ぬれ禁止

水がかかる場所で使用したり、水にぬらしてはいけないことを示す記号です。

警告

万一、異常や故障が発生したときはすぐに使用をやめてください。

次のようなときは、そのまま使用すると、火災、感電の原因となります。
お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
お客さまによる修理は危険ですから絶対におやめください。



- 煙が出ている、変なおいや音がする（異常状態）
- 本機の内部に水や異物が入った
- 落としたり、破損した



分解しない

分解禁止 本機を分解、改造しないでください。火災、感電の原因となります。内部の点検、調節、修理は、お買い上げの販売店にご依頼ください。



ぬらさない

水ぬれ禁止 本機をぬらさないようにご注意ください。火災、感電の原因となります。



本機の上に水などの入った容器を置かない

禁止 内部に水などが入った場合、火災、感電の原因となります。



強い衝撃を与えたり、投げ付けたりしない

禁止 発熱、破裂、発火や機器の故障、火災の原因となります。



乾電池使用上の注意

禁止 乾電池の使い方を誤ると、乾電池の破裂、液漏れにより、火災、怪我や周囲を汚損する原因となることがあります。次のことをお守りください。

- 指定以外の乾電池は使用しない。
- 極性(＋と－)に注意し、表示通りに入れる。
- 種類の異なるものや、新旧の乾電池を混ぜて使わない。
- 乾電池を充電、過熱、分解したり、火や水の中に投入しない。ショートさせない。
- ネックレスなどの金属物と一緒にしない。
- 長期間(1ヶ月以上)使用しないときは、乾電池を取り出しておく。
- 乾電池を直射日光が当たる場所や高温多湿の場所に置いておかない。

もし液漏れが起こったときは、液が電池ケースに付いた場合はよくふき取ってから新しい乾電池を入れてください。万一漏れた液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。

⚠ 注意



本機の上に重いものを置かない

禁止 本機の故障の原因となることがあります。



電気毛布・電気あんななどの電気製品と同時使用しない

禁止 本機の故障や感電の原因となることがあります。



使用中の情報機器やテレビ・音響機器の近くに置かない

禁止 テレビなどに雑音が生じたり、磁気ディスクに悪影響を与える原因となることがあります。



本機や付属品の設置、保管場所に注意

- 湿気、ほこりの多い場所や、油煙、湯気が当たった場所に置いたり保管しないでください。火災、感電等の原因となることがあります。
- 直射日光が当たる場所や高温多湿の場所に放置しないでください。火災、故障等の原因となることがあります。



不安定な場所に置かない

禁止 不安定または振動の多い場所、棚などに置かないでください。落ちたり、倒れたりして、けがの原因となることがあります。

電波について

■本機は、2.458GHzの周波数を使用する無線設備です。

移動体識別装置の帯域が回避不可能で、

想定される与干渉距離は40mです。

本機には、それを示す右記のマークが貼付されています。



■本機の使用周波数に関わるご注意

この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)及び特定小電力無線局(免許を要しない無線局)並びにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。

1. この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局並びにアマチュア無線局が運用されていないことを確認して下さい。
2. 万一、本機から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、本機のACアダプターを抜いて、お客様相談室(8ページ)にご連絡いただき混信回避のための処置等(例えば、パーティションの処置等)についてご相談ください。
3. その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合等何かお困りのことが起きたときは、お客様相談室(8ページ)へお問い合わせください。




電波干渉について

■本機は、2.4GHz(ギガヘルツ)の周波数帯の電波を利用しています。この周波数帯では、電子レンジや無線LAN機器などが電波を使用していますので、電波干渉により通信に支障を及ぼす恐れがあります。また、他の機器の動作や性能に影響を及ぼすことがあります。

その他

■分解・改造することは法律で禁じられています。(故障の際はご購入の販売店に修理をご依頼ください。)

各部の名称とはたらき

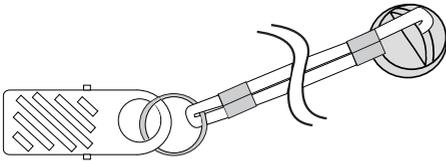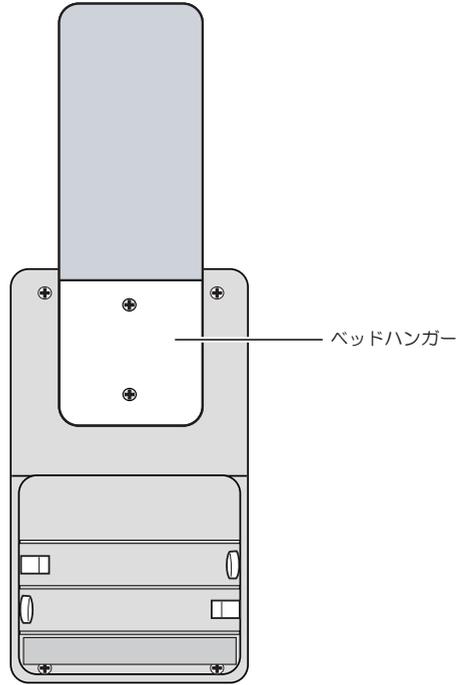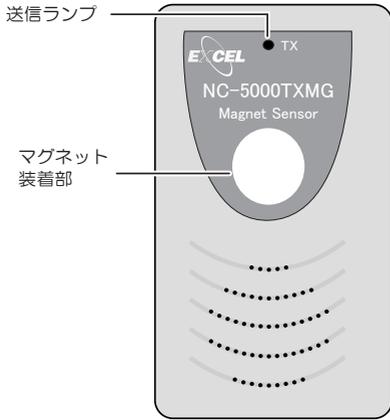

マグネット

●送信ランプ


マグネットが外れて信号を送信する際に点灯します。また乾電池の残量が少なくなった際に点滅してお知らせします。このランプが点滅をしていたら電池を交換してください。

●マグネット装着部

付属のマグネットを取り付けます。

●ベッドハンガー

使用する場所に合わせて曲げることができます。

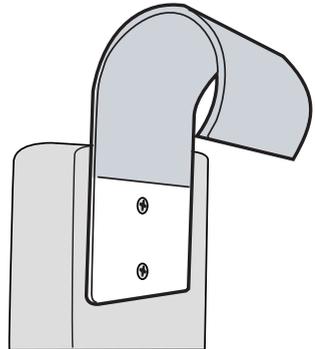

ベッドハンガー折り曲げ例


登録方法

『見張り番Ⅱ』マグネットセンサーは使用前に各受信機への登録が必要になります。登録方法はそれぞれの受信機で異なりますので、ご使用の受信機の取扱説明書をご覧ください。

使用方法

1. 「マグネットセンサー」に単3形アルカリ乾電池をセットします。
2. マグネット装着部にマグネットを取り付けます。
3. ハンガーを使って車イス / ベッドに取り付けます。
4. マグネットについているクリップを利用者さんに取り付けて、紐の長さを適度な長さに調整します。
5. 利用者さんが立ち上がる / 起き上がるなどして本体からマグネットが外れると信号を登録した受信機へ送信します。

設置例：

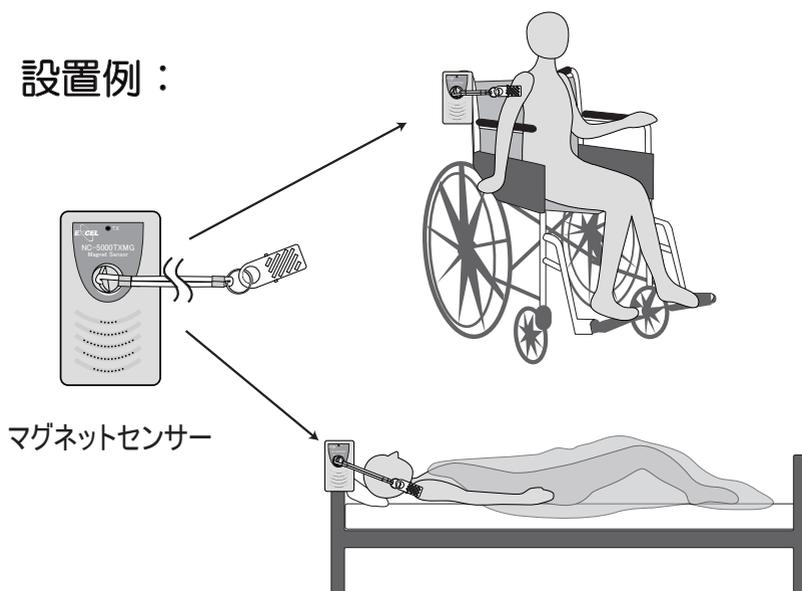

こんなときには・・・（故障とお考えになる前に）

利用者さんが車イス / ベッドから離れているのに受信機が反応しないとき

- 乾電池がきちんと入っていることを確認してください。乾電池が消耗していないかどうか、また、乾電池が間違っって入っていないかなどを確認してください。
- マグネットがうまく外れない場合は、マグネットについている紐の長さの調整や、本体の位置を調整してください。
- 受信機に登録できているかを確認してください。受信機への登録方法はご使用になる各受信機の取扱説明書をご確認ください。

見張り番II マグネットセンサー 仕様

項目	仕様
電源	単3形アルカリ電池2本
電池寿命※1	約1年間
周波数帯	2.4GHz帯
外形（幅×奥行×高さ[mm]）	62×31×111
重量[g] ※2	約140g

※1 24時間連続使用（1日5回発報の場合）
製品に付属の電池は、機能テスト用電池のため通常の電池寿命より短い場合があります。

※2 ベッドハンガー無し、電池挿入時の重量

保証書 (保証規定)

1. 見張り番Ⅱマグネットセンサーはお買い上げの日から1年間保証いたします。
2. お客様が取扱説明書にしたがった使用状態のもとで、保障期間内に万一故障をした場合には、無償で修理または交換をさせていただきます。
3. 保証期限内でも次のような場合は有料修理とさせていただきます。
 - ① 本保証書のご提示の無い場合
 - ② 本保証書にお客様名、お買い上げ年月日、販売店名の記入が無い場合、あるいは字句を書きかえられた場合
 - ③ 使用上の誤りによる故障および損傷
 - ④ 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の仕様電源（電圧、周波数）などによる故障および損傷
 - ⑤ お買い上げ後の取付場所の移動、落下等による故障および損傷
 - ⑥ 本製品に接続している当社指定以外の機器および消耗品に起因する故障および損傷
4. 不当な修理や改造が行われたものは一切の修理をお受けできません。
5. この保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

* 故障品の修理を円滑かつ迅速に行なうため、修理をご希望の際は、お買い上げ店またはお客さま相談室まで本保証書を添付のうえ、ご郵送ください。

品番	NC-5000TXMG2		問 合 せ 先	お客様相談室 カスタマーサポートセンター 〒760-0080 香川県高松市木太町835-1 TEL: 087-815-0805 FAX: 087-869-2701
製造番号				
保証期間	*お買い上げ日から1年間 お買い上げ日 年 月 日			
お客さま	ご住所	〒		
	お名前	(フリガナ)		
	TEL	市外局番	()	

販売店	株式会社エクセルエンジニアリング https://www.excel-jpn.com/ 
-----	--